

Gebruikershandleiding Echoscreen III communicatie

Versie 4 juli 2017

Inhoud

1	Inleiding	2
2	In gebruik nemen van de nieuwe echo-screen	2
2.1	Registreren	2
2.2	Eerste keer communiceren	2
3	Communiceren	2
3.1	Testen of het communicatieprogramma kan communiceren met het CANG	2
3.2	Communiceren met de echo-screen	3

1 Inleiding

Het programma “Echo-screen III communicatie” is een programma dat de NSDSK heeft gemaakt om de 3^e generatie echo-screen te kunnen laten communiceren met het CANG.

De communicatie verloopt via een laptop of PC met daarop Windows 7, 8 of 10.


De communicatiesoftware en de bijbehorende installatiehandleiding is gratis te downloaden via (klik op de link):

<https://drive.google.com/folderview?id=0B897pMYlo8JTZWdtaWZTQmRzSVU&usp=sharing>

2 In gebruik nemen van de nieuwe echo-screen

2.1 Registreren

Voordat met de echo-screen gecommuniceerd kan worden moet deze geregistreerd zijn in het CANG. Neem hiervoor even contact op met de NSDSK helpdesk neonatale gehoorscreening:

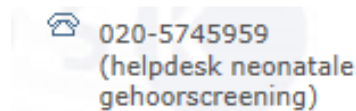


2.2 Eerste keer communiceren

Als er nog nooit met de echo-screen is gecommuniceerd dan zal deze nog niet de juiste instellingen bevatten. *Gebruik de echo-screen dan ook niet voordat er een keer mee is gecommuniceerd.* Bij de eerste keer communiceren zullen namelijk alle kind- en meetgegevens worden verwijderd.

3 Communiceren


3.1 Testen of het communicatieprogramma kan communiceren met het CANG

Als u het communicatieprogramma heeft geïnstalleerd kunt u de communicatie met het CANG testen door op de knop “Test communicatie met CANG” te klikken. U test dan :

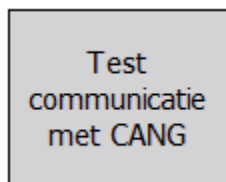

- Of u een internet verbinding heeft
- Of de certificaten “CANG communicatie” en “CA_NSDSK” juist zijn geïnstalleerd
- Of de communicatie met het CANG niet wordt verstoord door een firewall of proxy server

Als alles in orde is krijgt u onderstaande melding:

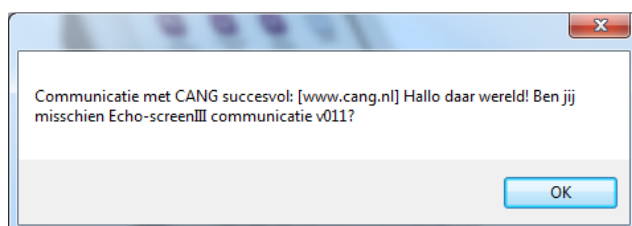


3.2 Communiceren met de echo-screen

Sluit de echo-screen m.b.v. de bijgeleverde USB-kabel aan op de computer. U kunt de USB-kabel rechtstreeks op de echo-screen aansluiten, maar u kunt ook de echo-screen in het docking-station zetten en de docking-station vervolgens weer met de USB-kabel aansluiten op de computer. Voor het communiceren maakt dat niet uit.

Zet vervolgens de echo-screen aan en start het communicatieprogramma. Klik op “Start communicatie met CANG”:




Als dit de eerste keer is dat er wordt gecommuniceerd met deze echo-screen dan zal deze onderstaande melding geven.

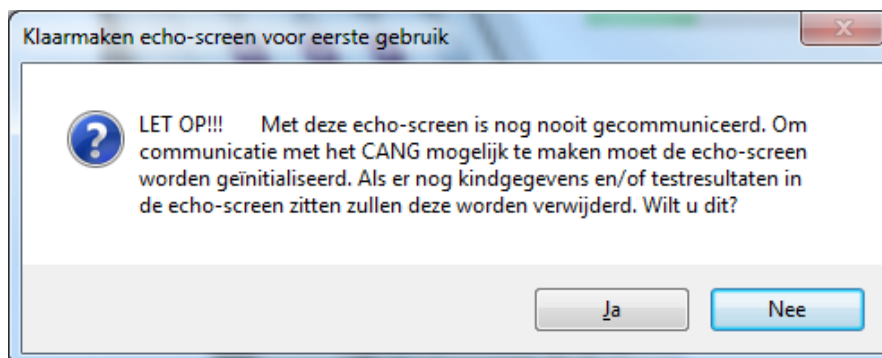


Klik op ‘Ja’ als u de communicatie wilt starten.

Als u onderstaande melding krijgt dan is de echo-screen nog niet in het CANG geregistreerd.

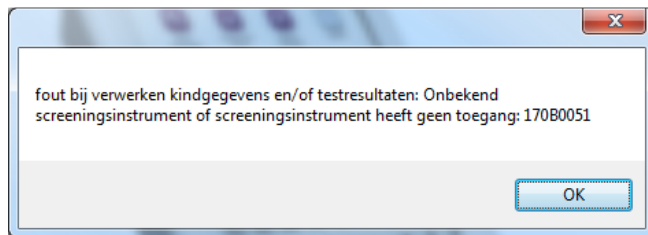


Neem in dit geval contact op met de NSDSK helpdesk neonatale gehoorscreening:

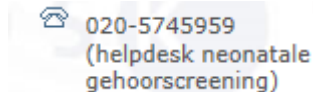

Is de echo-screen wel geregistreerd dan zal het programma de echo-screen uitlezen, met het CANG communiceren en vervolgens de echo-screen vullen met de gegevens van de kinderen die nog gescreend moeten worden.

Als de echo-screen klaar is met communiceren krijgt u de melding:

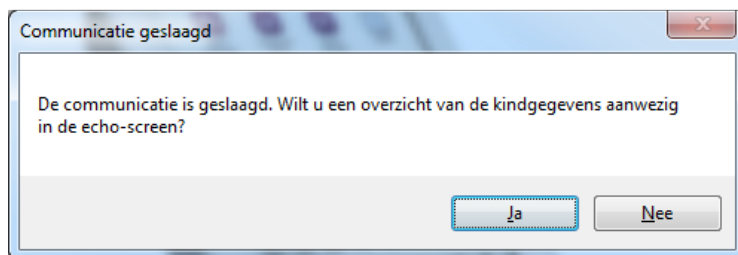

Wilt u wel een overzicht, dan klikt u op 'Ja':

Kinderen in echo-screen 170B0051

Achternaam	Voornaam	Geboren	Adres	Linkeroor	Recheroor
Amsterdam	Wendy	03/05/2011	Teststraat 169 162, 1234AA, Testplaats169	niet getest	niet getest
Blaauw	...	19/05/2011	Teststraat 79 266 A, 1234AA, Testplaats79	niet getest	niet getest
Blom	Usnavi	12/04/2013	...	niet getest	niet getest
Blom	Usnavi	12/04/2013	...	niet getest	niet getest
Blom	ROHAAN	03/07/2011	Teststraat 3268 196, 1234AA, Testplaats3268	niet getest	niet getest
Bell P	Pietje	01/01/2000	annie mg smidtstraat 1, 1234AA, testplaats 123	niet getest	niet getest
Blom	Wendy	19/05/2011	Teststraat 173 12, 1234AA, Testplaats173	niet getest	niet getest
Blom	...	26/05/2011	Teststraat 3, 1083AB,	niet getest	niet getest
Blom	...	28/12/2012	...	niet getest	niet getest
Blom	...	05/05/2011	2/10/2000,	niet getest	niet getest
Blom	...	03/06/2011	Teststraat 232 41 3, 1234AA, Testplaats232	niet getest	niet getest
Blom	...	07/06/2011	Lutmastraat 167, 1073GX, Amsterdam	niet getest	niet getest
dora	dora	05/10/2015	, ,	niet getest	Onvoldoende
Blom	Michael	06/10/2015	Kr...	niet getest	Onvoldoende
Blom	Liam	15/03/2015	Lutmastraat 167, 1073gx, Amsterdam	niet getest	niet getest
Jaspers	M...	10/03/2011	...	niet getest	niet getest
Blom	...	04/05/2011	Teststraat 2606 6 2, 1234AA, Testplaats2606	niet getest	niet getest
max	max	10/10/2015	, ,	niet getest	Onvoldoende

Print

Sluit

Vervolgens kunt u het overzicht printen door op “Print” te klikken en weer sluiten door op “Sluit” te klikken.

U bent klaar! Als u met nog een echo-screen wilt communiceren dan herhaalt u de hele procedure, zoniet, klik dan op “Sluit”:

